

# Masque de protection FFP2 / FFP2 Atemschutzmaske




Model: DM9501 Classification: FFP2 NR

EN 149:2001+A1:2009



Regulation(EU) 2016/425

CE 2834

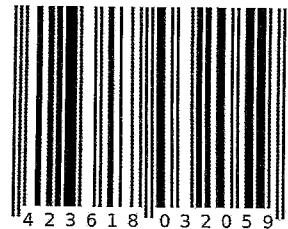

## Notice d'utilisation / Gebrauchsanweisung

- 1) Ouvrir et tenir le masque par les attaches auriculaires / Öffnen und halten Sie die Maske an den Ohrclips
- 2) Placez le masque en position ouverte et couvrant le nez et la bouche / Legen Sie die Maske in die offene Position und bedecken Sie Nase und Mund.
- 3) Placez les 2 attaches derrière les oreilles (Fig. 1c) / Platzieren Sie die 2 Clips hinter den Ohren (Abb. 1c)
- 4) Si le masque n'est pas assez bien ajusté, utilisez l'extenseur de masque (Fig. 1d) / Wenn die Maske nicht fest genug sitzt, verwenden Sie den Maskenverlängerer (Abb. 1d).
- 5) Ajustez bien la barette nasale sur votre nez afin de que le masque soit contre le visage / Stellen Sie das Objektivrevolver gut auf Ihre Nase ein, sodass die Maske an Ihrem Gesicht anliegt
- 6) Couvrez le masque avec vos mains afin de vérifier l'étanchéité. (Voir instructions) / Decken Sie die Maske mit Ihren Händen ab, um nach Undichtigkeiten zu suchen. (Siehe Anleitung)

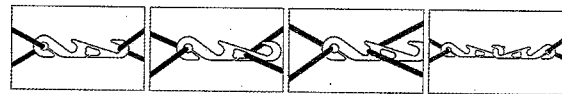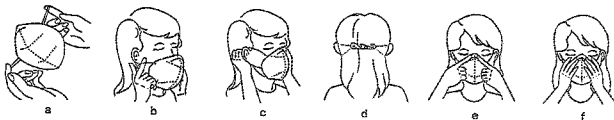

## Avertissement :


- 1) Ne pas utiliser le masque ou entrer ou rester dans un endroit contaminé sous les conditions suivantes :
  - a) L'atmosphère contient moins de 19.5% d'oxygène.
  - b) Si vous sentez une contamination
  - c) Pour se protéger contre les gaz ou les vapeurs.
  - d) Si vous ne savez pas la contamination ou son pourcentage ou s'il y a un danger de mort ou pour votre santé.
  - e) Pour la soudure, peinture, amiante.
  - f) Dans des atmosphères explosives.
- 2) Ne pas modifier ou mal utiliser le masque.
- 3) Ne pas utiliser le masque si l'étanchéité n'est pas garantie. (Barbes)
- 4) Changer de modèle de masque si l'étanchéité n'est pas obtenue.
- 5) Changer de masque si respirer devient difficile ou si le masque est endommagé.
- 6) Ce masque aide à protéger pour certains contaminants mais n'élimine pas les risques d'exposition ou de contracter des maladies ou infections. Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies ou la mort.
- 7) Les masques avec le marquage 'NR' ne peuvent pas être réutilisés.

## Vérification étanchéité / Dichtheitsprüfung :

- 1) Couvrir le masque avec les 2 mains et expirez profondément. Ne pas bouger la position du masque / Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab und atmen Sie tief aus. Bewegen Sie die Position der Maske nicht
- 2) Si l'air fuit autour du nez, ajustez la barette nasale et répétez l'opération / Wenn Luft um die Nase austritt, stellen Sie das Objektivrevolver ein und wiederholen Sie den Vorgang
- 3) Si l'air fuit à travers les côtés, ajustez les attaches et répétez l'opération / Wenn Luft durch die Seiten austritt, stellen Sie die Clips ein und wiederholen Sie den Vorgang
- 4) Attention : Ces opérations sont importantes pour la bonne utilisation du masque / Warnung: Diese Vorgänge sind wichtig für die korrekte Verwendung der Maske.

## Warnung :

- 1) Verwenden Sie die Maske nicht und betreten oder bleiben Sie nicht unter folgenden Bedingungen in einem kontaminierten Bereich:
  - a) Die Atmosphäre enthält weniger als 19,5% Sauerstoff.
  - b) Wenn Sie eine Kontamination spüren
  - c) Zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen.
  - d) Wenn Sie die Kontamination oder ihren Prozentsatz nicht kennen oder wenn eine Gefahr für das Leben oder Ihre Gesundheit besteht.
  - e) Zum Schweißen, Lackieren, Asbest.
  - f) In explosionsgefährdeten Bereichen.
- 2) Ändern oder missbrauchen Sie die Maske nicht.
- 3) Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Versiegelung nicht garantiert ist. (Bärte)
- 4) Ändern Sie das Maskenmodell, wenn die Versiegelung nicht erhalten wird.
- 5) Wechseln Sie die Maske, wenn das Atmen schwierig wird oder wenn die Maske beschädigt ist.
- 6) Diese Maske schützt vor bestimmten Verunreinigungen, schließt jedoch nicht das Risiko einer Exposition oder der Ansteckung mit Krankheiten oder Infektionen aus. Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.
- 7) Masken mit der Kennzeichnung 'NR' können nicht wiederverwendet werden.

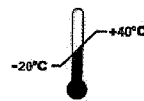

Temperature range of storage conditions Maximum relative humidity of storage conditions Mumdité  
Conditions de température de stockage relative maximale des conditions de stockage Maximale  
Lagertemperaturbedingungen relative Luftfeuchtigkeit der Lagerbedingungen Voir les informations fournies par le fabricant  
Siehe Angaben des Herstellers

Notified body: CCQS Certification Services Limited

Address: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,  
Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Manufacturer/Fabricant/Hersteller

Innovative Material and Devices, Inc.

Address: 3F, Building #5, No. 615 Fengdeng Rd., Jiading District, Shanghai 201801, China  
Toll free: +86 400 8202 169 Web: www.imdmedical.com

## Importateur / Importeur :

Dentalbel Sprl +32 493 638 638  
Bois Saint-Antoine, 1 info@dentalbel.be  
5100 Wepion www.dentalbel.be  
Belgique BE0640946306



Lot: 613147

Date fabrication / Fabricage datum / Herstellungsdatum : 27-01-2021

Date expiration / Vervaldatum / Haltbarkeitsdatum : 26-01-2024